



Macrolane™

Gracefully shapes your body

Votre médecin a été formé aux techniques d'injection Macrolane :

La 1^{ère} solution injectable pour redéfinir les volumes et les contours du corps sans chirurgie au cabinet de votre médecin

1. Qu'est-ce que Macrolane™ ?



- Macrolane est le premier produit à base d'acide hyaluronique pour le remodelage du corps.
- Il est fabriqué par le laboratoire Q-Med grâce à sa technologie unique et breveté NASHA™.
- Aujourd'hui, les gels NASHA ont été utilisés pour des améliorations esthétiques à travers plus de 9 millions de traitements, dans plus de 70 pays.
- La sécurité et l'efficacité des gels NASHA ont été cliniquement démontrées et sont très documentées dans le traitement esthétique du visage depuis plus de 10 ans.

Macrolane™

2. Qu'est ce qu'un gel NASHA™ ?



- Le gel NASHA™ est un gel transparent constitué d'acide hyaluronique stabilisé non-animal, fabriqué par Q-Med grâce à sa technologie unique et breveté NASHA.
- L'acide hyaluronique est issu de biotechnologies et est obtenu grâce à un procédé à travers lequel l'acide hyaluronique est stabilisé à moins de 1% afin de former un réseau tridimensionnel stable.
- La pureté et l'origine non-animale de l'acide hyaluronique utilisé comme matière première, ainsi que le procédé de stabilisation, ont permis de créer un gel biodégradable avec une meilleure durée d'action dans le corps et sans risque d'infection (en particulier d'origine animale).

Macrolane™

3. Quels sont les avantages de Macrolane™ ?



- Des enquêtes ont montré qu'un nombre considérable de femmes souhaiterait améliorer la forme de leur corps à l'aide d'une technique naturelle et non permanente, sans recourir aux implants ni à la graisse.
- De nombreuses femmes sont également réfractaires à une intervention sous anesthésie générale.
- Les risques de cicatrices, même si elles sont petites et peu visibles, les rendent également réfractaires à toute intervention chirurgicale.
- Avec Macrolane, la procédure est courte et ne requiert qu'une anesthésie locale. Le traitement ne nécessite ni arrêt de travail ni cessation d'activité et de loisir.

Macrolane™

4. Quels sont les indications du traitement ?



- Macrolane™ est un produit innovant actuellement indiqué pour la restauration des volumes et le remodelage des surfaces du corps, par exemple, les seins, les fesses et les mollets.
- Macrolane peut également combler les difformités concaves du corps, par exemple, une cicatrice chirurgicale ou un creux après une liposuction.
- Pour le traitement esthétique du visage, la gamme de produits Restylane® est disponible.

5. Macrolane™ peut-il altérer la lecture des mammographies / les tissus mammaires ?




- Les femmes qui envisagent une augmentation mammaire avec Macrolane veulent s'assurer que l'implant n'altérera pas l'efficacité du diagnostic réalisé à partir des mammographies futures et/ou les tissus mammaires eux-mêmes.
- Dans une étude, les mammographies après l'injection de Macrolane dans le sein ont été évaluées. L'étude a conclu que les mammographies des patientes étaient faciles à lire. D'autre part, la réalisation d'IRM en plus des mammographies habituelles n'apparaît pas nécessaire chez les patientes traitées avec Macrolane.

6. Comment se passe un traitement avec Macrolane™ ?



- Une anesthésie générale n'est pas nécessaire. Dans la plupart des cas, une anesthésie locale est suffisante.
- La traitement peut être réalisé dans une salle de soin dédiée et propre, respectant les conditions d'asepties requises pour des petits actes chirurgicaux.
- La procédure peut prendre entre 30 et 90 minutes, en fonction du site traité et de la quantité de gel injecté.

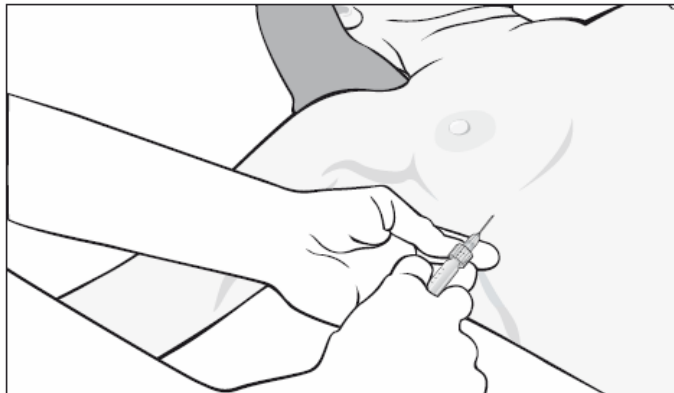

Macrolane™

7. Que se passe-t-il après un traitement avec Macrolane™ ?




- Après un traitement avec Macrolane, vous pouvez constater les résultats immédiatement et vous pouvez rapidement retourner à votre activité quotidienne, sans période d'éviction sociale.
- Néanmoins, des réactions courantes après une injection peuvent survenir telles que rougeur, gonflement, tension, douleur, saignement ou démangeaison. Ces réactions sont normales et se résorbent spontanément dans les semaines qui suivent.
- Durant la première semaine après le traitement, vous devrez éviter toute activité physique intense, qui pourrait exercer une pression sur la zone traitée. Vous devrez également éviter de vous exposer à des températures extrêmes.

Macrolane™

1. Combien de temps dure Macrolane™ ?



- Macrolane dure longtemps, mais n'est pas permanent. La durée d'effet attendue est de 1 an.
- Chaque programme de traitement individuel inclura une retouche annuelle pour maintenir et optimiser les résultats. Macrolane durera aussi longtemps que vous le souhaitez.

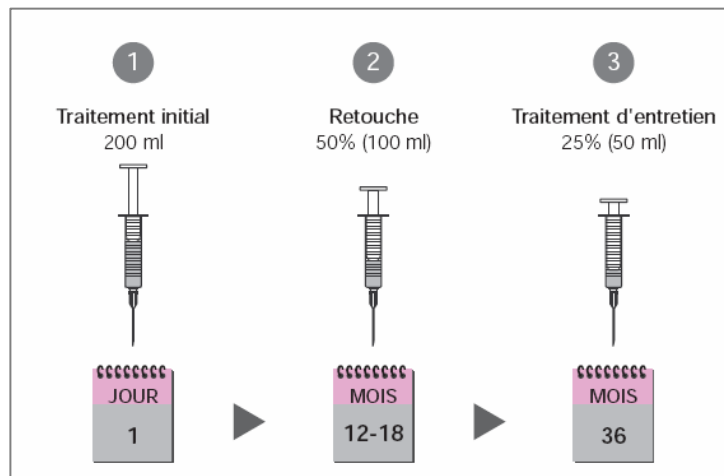

Macrolane™

« Je souhaite avoir, de manière temporaire, un remodelage et du volume pour mes seins, sans devoir recourir à la chirurgie. »

Suzanne, 42 ans, 1 enfant.

Avant



Après



Macrolane™

*« Je désire un changement,
mais je souhaite un résultat le plus naturel possible. »
Sarah, 30 ans, 1 enfant.*

Avant



Après



Macrolane™

« J'aimerais avoir des seins un peu plus larges, mais je ne veux pas de « gros seins ». Juste assez pour redonner à mon corps des proportions plus harmonieuses. » Anne, 35 ans.

Avant



Après



Macrolane™

*« J'aimerais que mes seins apparaissent plus pleins,
mais en conservant leur forme. »*

Julie, 36 ans.

Avant



Après



Macrolane™

*« J'aimerais avoir des pectoraux mieux dessinés,
en particulier sur la partie supérieure. »*

Eric, 42 ans.

Avant



Après



Macrolane™

« J'aimerais avoir des mollets plus galbés. »

Marie, 31 ans.

Avant



Après



Macrolane™



 **N° Vert 0 800 88 10 62**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE